

# Lehmän Suunavaaja – Nautojen letkutukseen

Ota hoidettava eläin kiinni hoito- / lukkoparteen.

Käytä seuraavaan toimenpiteeseen apuna esim. nenäpihtejä.

Aseta suunavaaja lehmän suuhun, muoviosan tulee asettua lehmän kielen päälle.

Pujota mustekala / kuminaru lehmän niskan taakse ja kiinnitä mustekalan/kuminarun koukut sivukoukkuihin.

Syötä letku, jonka pötsiin menevään päähän on tehty pieni reikä (n. 4cm päähän putken suusta) suunavaajan läpi lehmän pötsiin saakka. Suosittelemme käytettäväksi läpinäkyvää letkua, näin näet nesteen liikkumisen letkussa. Pieni puhaltaminen putkeen syöttövaiheessa edesauttaa lehmän nielemisrefleksiä.

Letkutuksen jälkeen, ennen putken poistoa pötsistä, puhalla putki tyhjäksi ja taita. Näin estetään nesteen joutuminen keuhkoihin.

Ennen eläimen letkutusta on hyvä keskustella **eläinlääkärin kanssa**

-eläimen terveydentilasta


-letkutuksen tarpeellisuudesta

-letkutettavista tuotteista

-letkutettavien aineosista / määrästä

-letkutustoimenpiteestä, sen toteuttamisesta, jotta se tapahtuu oikein, eikä nestettä joudu väärään paikkaan, esimerkiksi keuhkoihin.

Letkutus kannattaa aloittaa pienellä määrällä puhdasta vettä, varmistaen tällä, että **putki on pötsissä**. Mikäli lehmä alkaa yskimään, putki on väärässä paikassa. Mikäli lehmä alkaa yskimään, taita putki (jottei siellä mahd. oleva neste karkaa keuhkoihin) ja vedä se varovasti pois. Tyhjennä putki ja aloita sen syöttäminen uudelleen.

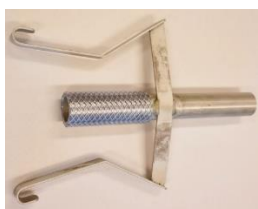

HUOM: Lisäksi tarvitaan n. 3 m kirkasta puutarhaletkua ja ratti. Letkun pötsiin menevään päähän tehdään putkeen ( n. 4 cm putken päästä) pieni reikä.