


Asennusohjeet

Pakkauksessa tulee olla

1. Hoitoteline x 1
2. Parsiinnikkeet x 2
3. Hihnalla varustettu leukalevy x 1

Kiinnitä parsiinnikkeet hoitotelineen takaosaan, EI kuitenkaan sen sivulta.

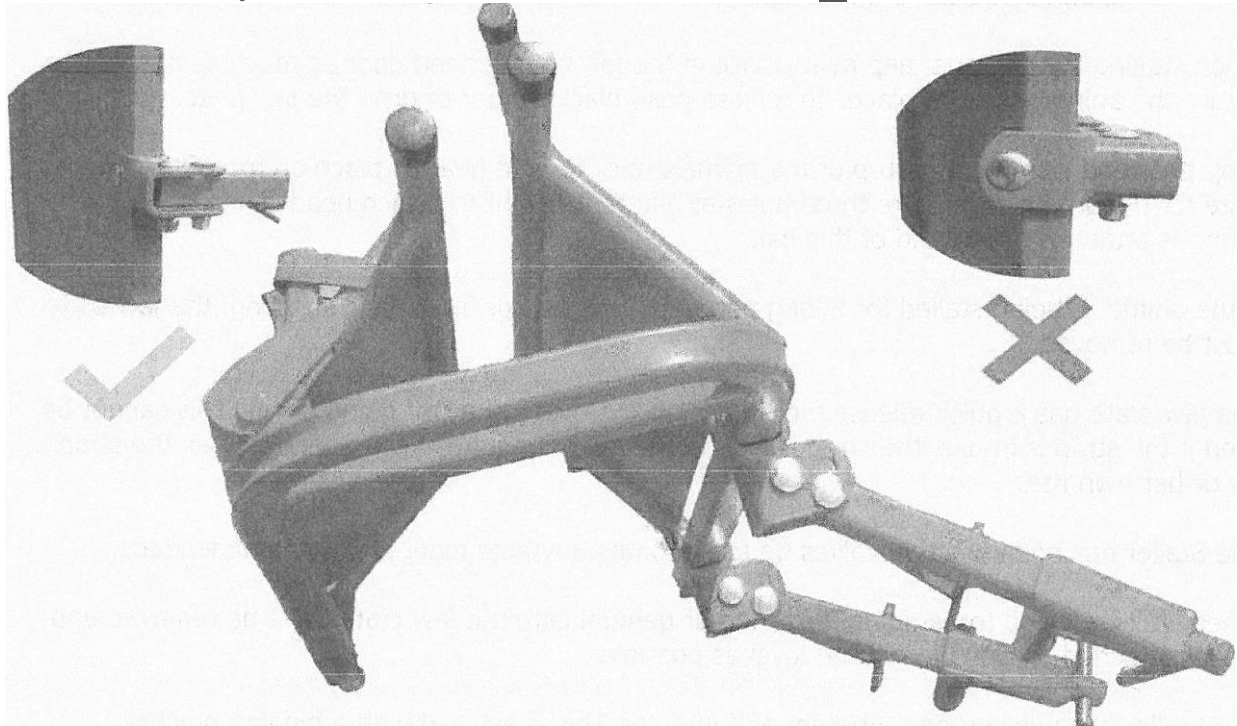


Parsiinnikkeiden kiinnitys vasemmalle puolelle

Käyttöön vasemmalta puolelta: kiinnitä kiinnike ylösalaisin tai vaihtoehtoisesti *poista* mutterit ja pultit saranakannattimesta, käännä se ylösalaisin ja kiinnitä mutterit ja pultit takaisin. Nyt voit kiinnittää parsiinnikkeet vasemmalle puolelle oikein päin pystyasentoon.


Leukalevy

Käytä leukalevyä sarvien nupotuksen yhteydessä.

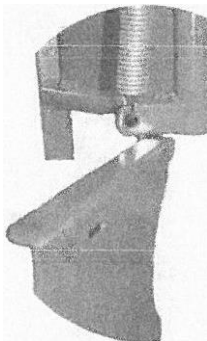

Pidä leukalevyä pystysuorassa ja aseta se reikään.

Käytä samaa asentoa levyn irrottamiseksi.

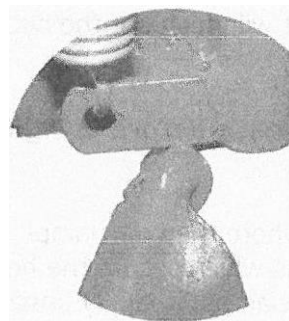

Leukalevyä ei voida kiinnittää, jos sitä pidetään kallistettuna.

Käyttöohjeet

1. Kun hoitoteline on asennettu, kiinnitä parsikiinnikkeet kahteen parren tankoon. Muista, hoitoteline on yhtä kestävä kuin parsi johon se on kiinnitetty.
2. Varmista, että parren tangot ovat sopivalla käyttökorkeudella. Hoitotelineen rasiuksen jakamiseksi, kiristä parsikiinnikkeet mahdollisimman korkealle. Kun se on kiinnitetty halutulle korkeudelle, kiristä lukkomutterit 17 mm avaimella tälle korkeudelle.
3. Kun vasikan tai lampaan pää kiinnitetään, sulje vasenta saranoitua **ovea** mahdollisimman paljon eläimen niskan lukitsemiseksi paikalleen. Vapauta painamalla mustaa liipaisinta tai pudota leukalevy alas.
4. Laske pään kiinnitystanko alas eläimen niskan päälle, jotta pää pysyisi paikallaan leukalevyllä sarvien nupottamisen aikana. Pään kiinnitystangolla on kolme kiinnitysreikää. Tämän tangon päähän on kiinnitetty jousi.
5. Jos eläintä pidetään paikallaan pitkän aikaa, esim. syötön tai rokotuksen aikana, leukalevy on irrotettava.
6. Leukalevyssä on pikalukko siltä varalta, että vasikka sattuisi lyhyistymään. Lukkoa ei kuitenkaan voida käyttää hihnakytkennän tapauksessa. Hihna olisikin siksi käytettävä vain kun se on välttämätöntä. Eläimen hoitaja kytkee hihnan vain omalla vastuullaan.
7. Hoitotelinettä on suotavaa käyttää enintään 4 kk:n ikäisten vasikoiden kanssa. Sitä vanhemmille telinettä ei suositella.
8. Kun uuhi kytketään telineeseen karitsointia, imettämistä tai yleisiä hoitotoimia varten, leukalevy on irrotettava ja hoitoteline on kiinnitettävä mahdollisimman lähelle maan tasoa.
9. Hoitotelineessä on kaksi asetusta: Suora ja kulmakytkentä. Tämä on toteutettu saranakannattimen avulla, mikä tekee hoitotelineestä paremmin säädeltävän sekä itsesi että eläimesi kannalta.
10. Kun paras kytkentäasetto on valittu, neljä lukkomutteria tulee kiristää hoitotelineen kiinnittämiseksi haluttuun asentoon.
11. Suositeltavat asetukset:
Suorassa: lampaita varten
Taaksepäin kallistettuna: vasikoita varten

Syy suositukseen on se, että teline työntää vasikan päätä ulospäin eläimen ollessa kytkettynä, jolloin sarvien sisäpuoli on paremmin näkyvissä.

Käytön helpottamiseksi, rasvaa ennen käyttöä:

1. Leukalevyn jousitappi;
2. Leukalevyn sarana;
3. Rungon osa, jossa kaksi kiinnikettä liukuvat ylös ja alas;
4. Alapuolet kahdesta kiinnikkeestä, jotka lukitsevat pään kiinnitystangon;
5. Kiinnikkeiden mutterit ja kierteet. Irrota ne kokonaan voitelua varten.

