

4D-testi

Vasikoiden ripulitesti

Kerbl-pikatesti rotavirusten, naudan koronavirusten (BCV), E.coli-K99:n ja Cryptosporidium parvumin kvalitatiiviseen tunnistamiseen vasikoiden ulosteissa

Käyttö

A) Ota ulostenäyte mukana tulleella pipetillä.

Selittävä huomautus:

- Jos uloste on kiinteää, käytä näytteiden ottamiseen näytepullon korkissa olevaa applikaattoria. Varmista, että otat riittävästi ulostetta, jotta testineste selvästi värjäytyy.
- Vältä mahdollisuuksien mukaan ottamasta limaa.
- Ulostenäytteet navetan lattiasta voivat väärentää tuloksia.

B) Tipauta 3-5 tippaa ulostetta näytepulloon pipetin avulla. Testinesteen tulee värjäytyä selvästi.

C) Sulje näytepullo ja ravista sitä kevyesti.

D) Poista testikasetti umpeen juotetusta alumiinipussista ja aseta kasetti tasaiselle pinnalle.

E) Kierrä näytepullon kärjen korkki auki.

F) Tiputa 3 tippaa testiseosta jokaiseen testikasetin näyteaukkoon.

Huomautus:

- Mikäli neste ei nosta testiliuskaa, voit tipauttaa näyteaukkoon lisää pisaroita.
- Nestettä ei saa tippua näyttöpaneelleille.

G) Lue tulos näyttöpaneeleista 10 minuutin kuluttua.

10 minuuttia

Testitulos on positiivinen, kun T- ja C-merkinnät ovat näkyvissä.

Rotavirus positiivinen	Kryptosporidioosi positiivinen
-------------------------------	---------------------------------------

Testitulos on negatiivinen, kun vain C-merkintä on näkyvissä.

Koronavirus negatiivinen	E.coli negatiivinen
---------------------------------	----------------------------

Säilytys

Testi on säilytettävä ja suoritettava kuivassa paikassa ja 2-30 °C:n lämpötilassa.

Vastuuvollisuus

Koko tämän tuotteen käyttöön liittyvän vastuuriskin kantaa ostaja. Valmistaja ei vastaa mistään epäsuorasta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, joka johtuu testien käytöstä, suorittamisesta tai arvioinnista tällä tuotteella.

Hävittäminen

Mitään erityisiä hävittämismenetelmiä ei vaadita.

Pakkauksen sisältö

5 testikasettia alumiinisissa kutistekalvopusseissa

5 testinestettä sisältävää näytepulloa

5 pipettiä

1 ohje

Ota huomioon

Kertakäyttötesti

Suorita testi mahdollisimman pian testikasettipakkauksen avaamisen jälkeen.

Testikasettipakkaus ei saa olla vahingoittunut ennen käyttöä.

Ota huomioon arviointiaika.

4D-testin herkkyys ja tarkkuus

	Herkkyys	Tarkkuus
Rotavirukset	99,0 %	98,0 %
Naudan koronavirukset	98,4 %	98,0 %
E.coli-K99	97,8 %	99,0 %
Cryptosporidium parvum	98,2 %	99,0 %
Tutkimus vs. ELISA		

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Germany

Puh. +49 8086 933-100

Faksi: +49 8086 933-500

info@kerbl.com

www.kerbl.com

TOIMITTAJA: Oy Teollisuushankinta TH AB, Indolantie 11, 67600 KOKKKOLA

Puh 020 765 9580 www.teollisuushankinta.fi